

# HEADALOFT™

## Retningslinjer for installation og vedligeholdelse

**HEADALOFT™** er en patenteret innovativ løsning til voksne og børn, der har brug for støtte til hovedet i kørestolen.

**HEADALOFT™** er behagelig at have på og giver hoved og nakke fleksible støtte i en oprejst stilling.

**HEADALOFT™** har en valgfri occipital støtte, der kan tilføjes for at give ekstra støtte til hoved og nakke efter behov.

Produktet er velegnet til alle kørestole udstyret med nakkestøtte og de fleste autostole. **HEADALOFT™** Den er nem at installere, kan hurtigt flyttes mellem kørestol og autostol eller enhver anden type sæde, der har en nakkestøtte, som **HEADALOFT™** kan fastgøres til.



### Tekniske Specifikationer

- Lavet af højkvalitets, slidstærkt stof.
- **HEADALOFT™** er brændhæmmende.
- Indeholder tre hovedstøttestropper i forskellige størrelser, så den kan justeres til enhver hovedstørrelse.
- Kan monteres på alle kørestole med standard nakkestøtte.
- Passer til de fleste autostole.
- Giver 360° hovedstøtte.
- Opfylder OEKO-TEX 100 standarden
- Crashtestet
- CE-registeret.
- **HEADALOFT™** har en valgfri occipital støttepude, der kan tilføjes for at give ekstra hoved-og nakkestøtte efter behov.



FDA  
REGISTERED


CE

Headovations garanterer, at produktet i en periode på 12 måneder fra købsdatoen vil være fri for materiale-og håndværksfejl, underlagt Headovations politik og forudsat, at produktet skal have en original identifikationsmærkat. Ovenstående garanti er betinget af, at køber konstaterer, at produktet er blevet korrekt håndteret og opbevaret, i overensstemmelse med Headovations instruktioner. Når Headovations konstaterer, at produktet er defekt, skal Headovations erstatte de beskadigede produkt.



## Installation Instruktioner:

Installering **HEADALOFT™** på en kørestol er meget let og kan udføres meget hurtigt. Følg disse enkle instruktioner trin for trin for at installere **HEADALOFT™**.

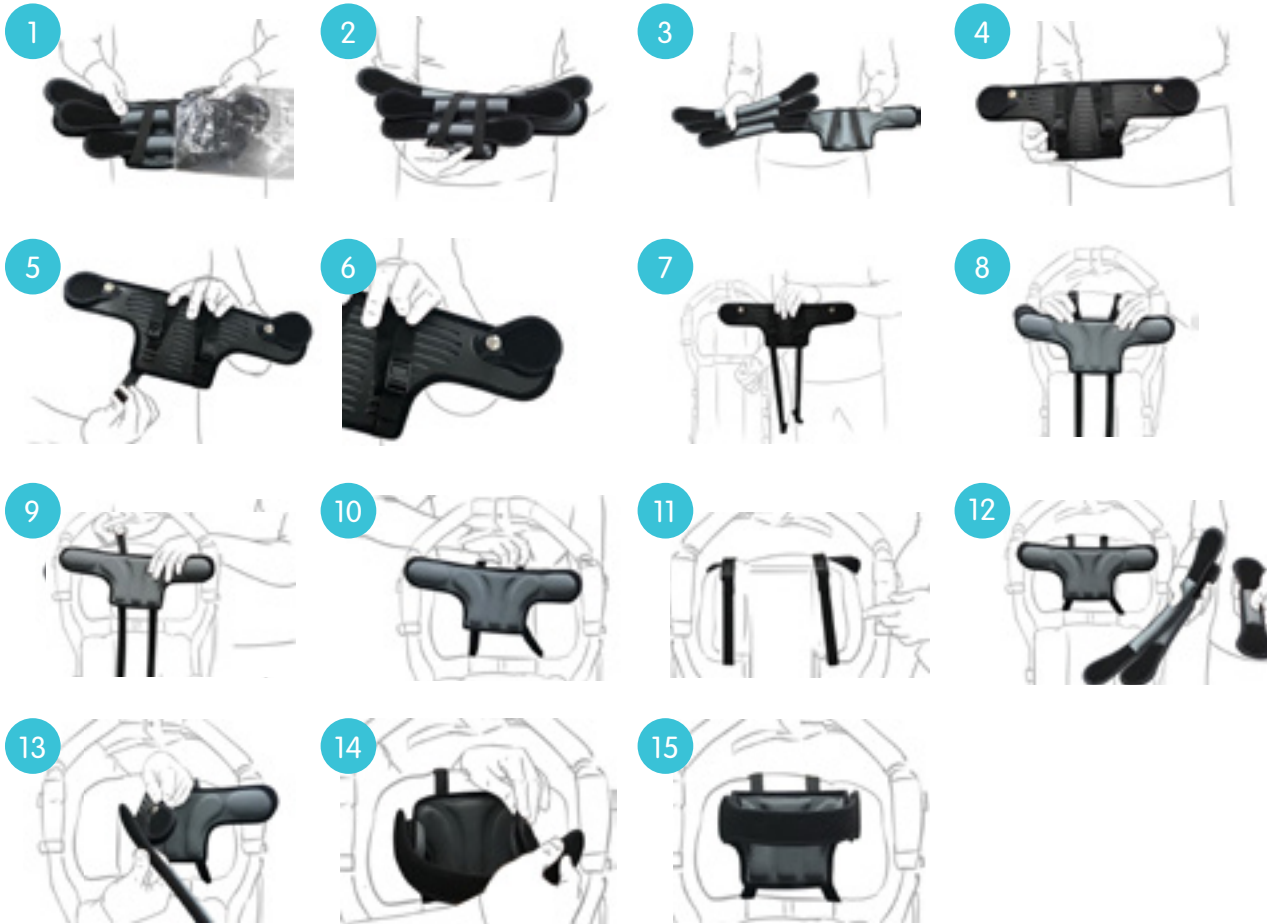

En valgfri occipital støttepude kan tilføjes hvis der er behov for ekstra støtte.

## Vedligeholdelse:

**HEADALOFT™** kræver ingen særlig vedligeholdelse. Materialerne er meget holdbare og kræver kun lejlighedsvis vask. Den kan maskinvaskes i temperatur op til 30°C. Blegemiddel bør ikke bruges da dette kan

beskadige materialet.

Efter vask **HEADALOFT™** skal lufttørres. Brug ikke tørretumbleren eller strygejern. Det skal heller ikke renses.

## Opbevaring:

Når den ikke er i brug, skal **HEADALOFT™** opbevares på et rent, tørt sted.

**Headovations** blev grundlagt i 2014 af Ben Cohen Gazit. Dedikeret til at levere innovative hovedstøttesystemer.

**HEADALOFT™** har vist sig at være ekstremt effektiv til børn og voksne med motoriske lidelser, neuromuskulær lidelser, neurologiske lidelser (f.eks. cerebral parase) og fysiske skader.

Developed by:

**Headovations**  
HEAD SUPPORT SOLUTIONS



In Partnership with:

