

HEADALOFT™

Installations- und Wartungsrichtlinien

HEADALOFT™ ist eine patentierte, innovative Lösung für Erwachsene und Kinder, die an einen Rollstuhl gefesselt sind. **HEADALOFT™** bietet einen bequemen und sanften Halt für den aufgerichteten Kopf in einer vielseitig einsetzbaren, nicht einschnürenden Weise.

• **HEADALOFT™** bietet eine optionale Hinterkopfstütze, die ggf. angebracht werden kann, um Kopf und Hals zusätzlich zu stützen.



eignet sich für alle Rollstühle mit Kopfstütze sowie für spezielle Autositze und ist die perfekte Zusatzlösung für Kopfstützen. Er ist einfach zu installieren, kann schnell zwischen Rollstuhl und Autositz oder jeder anderen Art von Sitz mit einer Kopfstütze, an der der **HEADALOFT™** befestigt werden kann, umgestellt werden.



Technische Beschreibung

- Hergestellt aus haltbarem Qualitätsmaterial.
- Die **HEADALOFT™** Füllung ist schwer entflammbar.
- Mit Kopfstützriemen in drei verschiedenen Größen ist das Produkt auf beliebige Kopfgrößen einstellbar.
- Kann an allen Rollstühlen mit Standardkopfstützen befestigt werden.
- Passend für die meisten Autositze.
- Einhaltung der US-Sicherheitsstandards FMVSS 213, NPRM 213 für Crashtests.
- Bietet 360°-Kopfabstützung.
- Entspricht der Vorschrift OKEOTEX 100 und anderen internationalen Standards und ist bei der FDA registriert.
- **HEADALOFT™** ist mit optionalem Stützkissen für den Hinterkopf ausgestattet, das ggf. zusätzlichen Komfort bietet.



Headovations warrants that for a period of 12 months from the date of purchase, the product will be free from material defects in material and workmanship, subject to Headovations policy and provided that the product shall have an original identification label.

The above Warranty is subject to the buyer establishing that the product has been correctly handled and stored, in accordance with Headovations' instructions. In the event that Headovations finds that the product is defective, Headovations shall replace the damaged product.

Installationsanweisung:

HEADALOFT™ kann sehr einfach und schnell am Rollstuhl befestigt werden. Installieren Sie **HEADALOFT™** nach diesen einfachen Schritt-für-Schritt-Anweisungen



Instandhaltung:

HEADALOFT™ erfordert keine wirkliche Instandhaltung. Es ist extrem strapazierfähig und braucht nur hin und wieder gewaschen zu werden. Maschinenwaschbar bei Temperaturen bis 30°C / 86°F, jedoch sollte kein Bleichmittel verwendet werden, da dieses Aussehen und Material verändern kann.

Nach dem Waschen sollte **HEADALOFT™** weder gebügelt noch im Trockner behandelt werden. Lassen Sie es stattdessen an der Luft trocknen. Nicht chemisch reinigen.

Aufbewahren:

Bei Nichtgebrauch sollte **HEADALOFT™** sauber und trocken aufbewahrt werden.

Headovations wurde 2014 von Ben Cohen Gazit gegründet. Spezialisiert auf innovative Kopfstützensysteme.

HEADALOFT™ hat sich als äußerst effektiv für Kinder und Erwachsene mit motorischen, neuromuskulären und neurologischen Störungen (z. B. Zerebralparese) und körperlichen

Developed by:



13485:2016

In Partnership with:

