

HEADALOFT™

Linee guida per l'installazione e la manutenzione

HEADALOFT™ è una soluzione brevettata e innovativa per adulti e bambini che fanno uso di sedie a rotelle.

HEADALOFT™ sostiene piacevolmente e delicatamente la testa in posizione eretta e non restrittiva.

HEADALOFT™ è dotato di un cuscino di supporto per l'area occipitale che, se necessario, può essere aggiunto per fornire un ulteriore sostegno alla testa e al collo.

Adattabile a tutte le sedie a rotelle dotate di poggiatesta e ai sedili di auto, **HEADALOFT™** è un accessorio innovativo per il supporto della testa. È facile da installare e può passare rapidamente dalla sedia a rotelle al sedile dell'auto o a qualsiasi tipo di seduta dotata di un poggiatesta a cui HEADALOFT™ possa essere fissato.



Specifiche tecniche

- Realizzato in tessuto resistente di alta qualità.
- L'imbottitura di HEADALOFT™ è ignifuga.
- Include tre cinghie di sostegno per la testa di dimensioni diverse per adattarsi a qualsiasi circonferenza della testa.
- Si fissa su tutte le sedie a rotelle dotate di poggiatesta.
- Adattabile alla maggior parte dei sedili di auto.
- Testato in base agli standard di sicurezza dei crash test statunitensi US - FMVSS 213, NPRM 213.
- Offre un supporto per la testa a 360°.
- Soddisfa lo standard OKEOTEX 100
- Certificato FDA e CE



Headovations garantisce che, per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto, il prodotto sarà esente da difetti di materiali e di fabbricazione nel rispetto della politica di Headovations e a condizione che il prodotto riporti l'etichetta di identificazione originale. La garanzia di cui sopra è subordinata all'accertamento da parte dell'acquirente della corretta manipolazione e conservazione del prodotto, in conformità alle istruzioni di Headovations. Qualora il prodotto risultasse difettoso, Headovations sostituirà il prodotto danneggiato.

Istruzioni per l'installazione:

L'installazione di **HEADALOFT™** su qualsiasi dispositivo di seduta e mobilità dotato di poggiatesta è particolarmente semplice e può essere eseguita molto rapidamente. Seguire queste semplici istruzioni passo-passo per installare **HEADALOFT™**.



Manutenzione:

HEADALOFT™ non richiede una vera e propria manutenzione. È estremamente resistente e richiede solo lavaggi occasionali. Può essere lavato in lavatrice a temperature fino a 30 °C. Non candeggiare onde evitare di danneggiare l'aspetto e il materiale.

Dopo aver lavato **HEADALOFT™**, non stirlo né metterlo in asciugatrice. Lasciarlo asciugare naturalmente. Inoltre, non lavare a secco.

Conservazione:

Quando non viene utilizzato, **HEADALOFT™** deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto.

Headovations è stata fondata nel 2014 da Ben Cohen Gazit.

È dedicata alla fornitura di sistemi innovativi di supporto per la testa.

HEADALOFT™ si è dimostrato estremamente efficace nell'uso per bambini e adulti con disturbi motori, disturbi neuromuscolari, disturbi neurologici (per es., paralisi cerebrale) e lesioni fisiche.

Developed by:



In Partnership with:

