

HEADALOFT™

Installations- und Wartungsrichtlinien

HEADALOFT™ ist eine patentierte, innovative Lösung für Erwachsene und Kinder, die an einen Rollstuhl gefesselt sind. **HEADALOFT™** bietet einen bequemen und sanften Halt für den aufgerichteten Kopf in einer vielseitig einsetzbaren, nicht einschnürenden Weise.

- **HEADALOFT™** bietet eine Hinterkopfstütze, die ggf. angebracht werden kann, um Kopf und Hals zusätzlich zu stützen.



eignet sich für alle Rollstühle mit Kopfstütze sowie für spezielle Autositze und ist die perfekte Zusatzlösung für Kopfstützen. Er ist einfach zu installieren, kann schnell zwischen Rollstuhl und Autositz oder jeder anderen Art von Sitz mit einer Kopfstütze, an der der **HEADALOFT™** befestigt werden kann, umgestellt werden.



Technische Beschreibung


- Hergestellt aus haltbarem Qualitätsmaterial.
- Die **HEADALOFT™** Füllung ist schwer entflammbar.
- Mit Kopfstützriemen in drei verschiedenen Größen ist das Produkt auf beliebige Kopfgrößen einstellbar.
- Kann an allen Rollstühlen mit Standardkopfstützen befestigt werden.
- Passend für die meisten Autositze.
- Einhaltung der US-Sicherheitsstandards FMVSS 213, NPRM 213 für Crashtests.
- Bietet 360°-Kopfabstützung.
- Entspricht der Vorschrift OKEOTEX 100 und anderen internationalen Standards und ist bei der FDA registriert.



Headovations garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorbehaltlich der Bestimmungen der Richtlinie von Headovations und unter der Voraussetzung, dass das Produkt mit einem Original-Kennzeichnungsschild versehen ist. Die oben genannte Garantie gilt unter der Voraussetzung, dass beim Kauf festgestellt wird, dass das Produkt gemäß den Anweisungen von Headovations korrekt behandelt und gelagert wurde. Wenn Headovations feststellt, dass das Produkt defekt ist, wird Headovations das beschädigte Produkt ersetzen.

Installationsanweisung:

HEADALOFT™ kann sehr einfach und schnell am Rollstuhl befestigt werden. Installieren Sie **HEADALOFT™** nach diesen einfachen Schritt-für-Schritt-Anweisungen

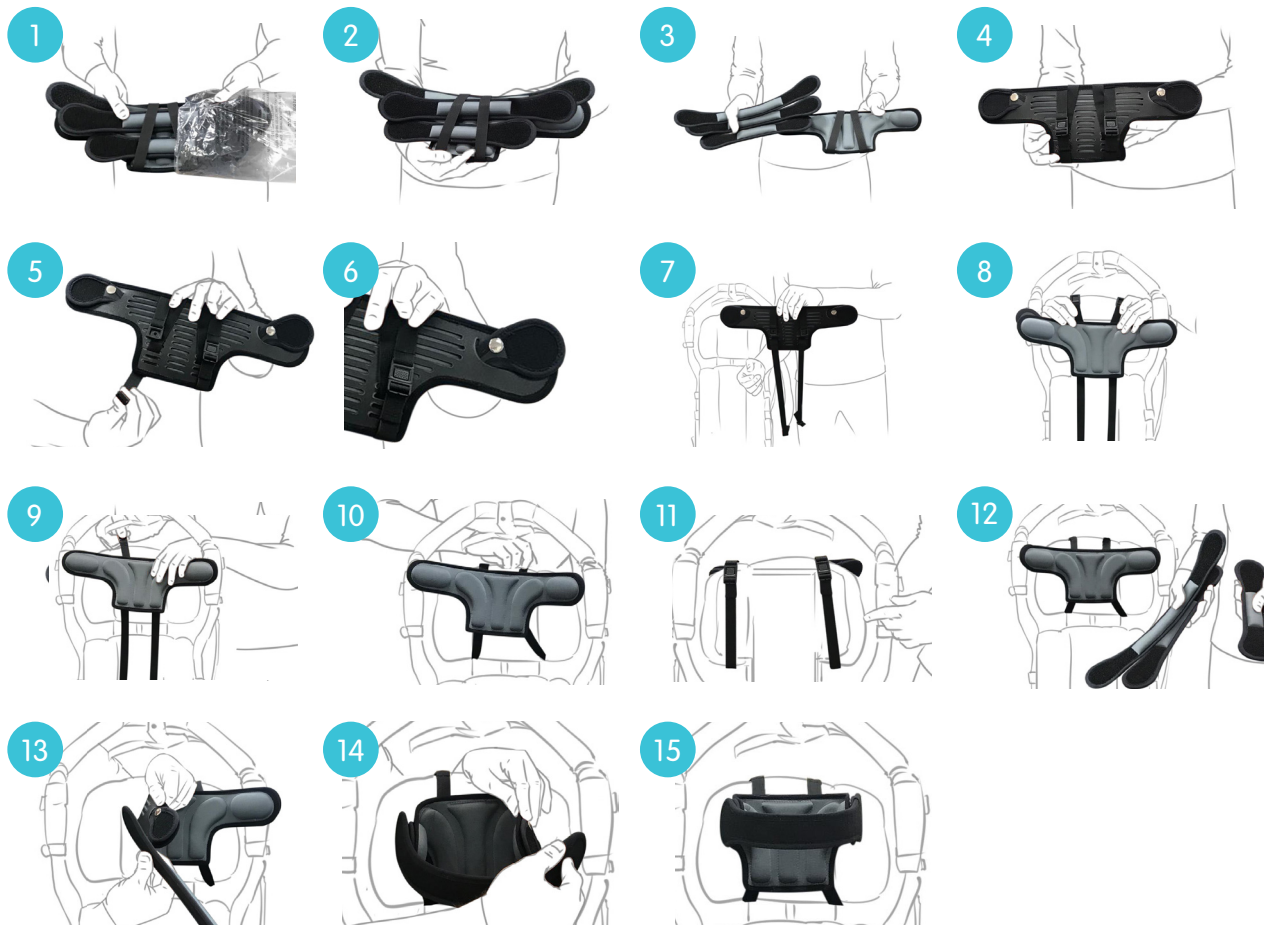

Instandhaltung:

HEADALOFT™ erfordert keine wirkliche Instandhaltung. Es ist extrem strapazierfähig und braucht nur hin und wieder gewaschen zu werden. Maschinenwaschbar bei Temperaturen bis 30°C / 86°F, jedoch sollte kein Bleichmittel verwendet werden, da dieses Aussehen und Material verändern kann.

Nach dem Waschen sollte **HEADALOFT™** weder gebügelt noch im Trockner behandelt werden. Lassen Sie es stattdessen an der Luft trocknen. Nicht chemisch reinigen.

Aufbewahren:

Bei Nichtgebrauch sollte **HEADALOFT™** sauber und trocken aufbewahrt werden.

Headovations wurde 2014 von Ben Cohen Gazit gegründet. Spezialisiert auf innovative Kopfstützsyste.me.

HEADALOFT™ hat sich als äußerst effektiv für Kinder und Erwachsene mit motorischen, neuromuskulären und neurologischen Störungen (z. B. Zerebralparese) und körperlichen

Developed by:



In Partnership with:




headaloft.com

Version: June 2022/2ndRev

Product May Differ From Shown

HEADOVATIONS LTD

3 Adirim st. Tel-Aviv
6918414 Israel

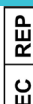

Obelis Group,
Bld. Général Wabis, 53,
Brussels, 1030, Belgium