

HEADALOFT™

Guía de instalación y mantenimiento

HEADALOFT™ es una solución innovadora y patentada para adultos y niños limitados por una silla de ruedas. **HEADALOFT™** da apoyo cómodo y suavemente a la cabeza, manteniéndola en posición vertical de una manera versátil y no restrictiva.

• **HEADALOFT™** tiene un soporte occipital que se puede agregar para proporcionar soporte adicional para la cabeza y el cuello, según sea necesario..

adecuado para todas las sillas de ruedas equipadas con reposacabezas y asientos especiales para el automóvil, es la mejor solución complementaria de soporte para la cabeza. Es fácil de instalar, se puede transferir rápidamente entre la silla de ruedas y el asiento del automóvil o cualquier otro tipo de asiento que tenga un reposacabezas al que se pueda acoplar el **HEADALOFT™**.



Especificaciones técnicas

- Hecho de tela duradera de alta calidad.
- El relleno de **HEADALOFT™** tiene relleno retardante a la llama.
- Incluye tres correas de diferentes tamaños para sostener la cabeza y permitir que se ajuste a distintos tamaños.
- Se acopla a todas las sillas de ruedas con reposacabezas estándar.
- Se adapta a la mayoría de los asientos de automóvil.
- Cumple con los estándares de seguridad de pruebas de choque de EE. UU. - FMVSS 213, NPRM 213.
- Proporciona soporte de 360° para la cabeza.
- Cumple con el estándar OKEOTEX 100, así como con otros estándares internacionales y está registrado en la FDA.




Headovations garantiza que, durante un período de 12 meses contados a partir de la fecha de compra, el producto estará libre de defectos en sus materiales y en la mano de obra, sujeto a la política de Headovations y siempre que el producto tenga su etiqueta de identificación original.

La garantía antes mencionada está sujeta a que el comprador demuestre que el producto ha sido manipulado y almacenado de manera correcta, de conformidad con las instrucciones de Headovations. En caso de que Headovations concluya que el producto es defectuoso, Headovations reemplazará el producto dañado.

Instrucciones de instalación:

Instalar **HEADALOFT™** en una silla de ruedas es muy fácil y se puede hacer muy rápidamente. Siga estas sencillas instrucciones paso a paso para instalar el **HEADALOFT™**

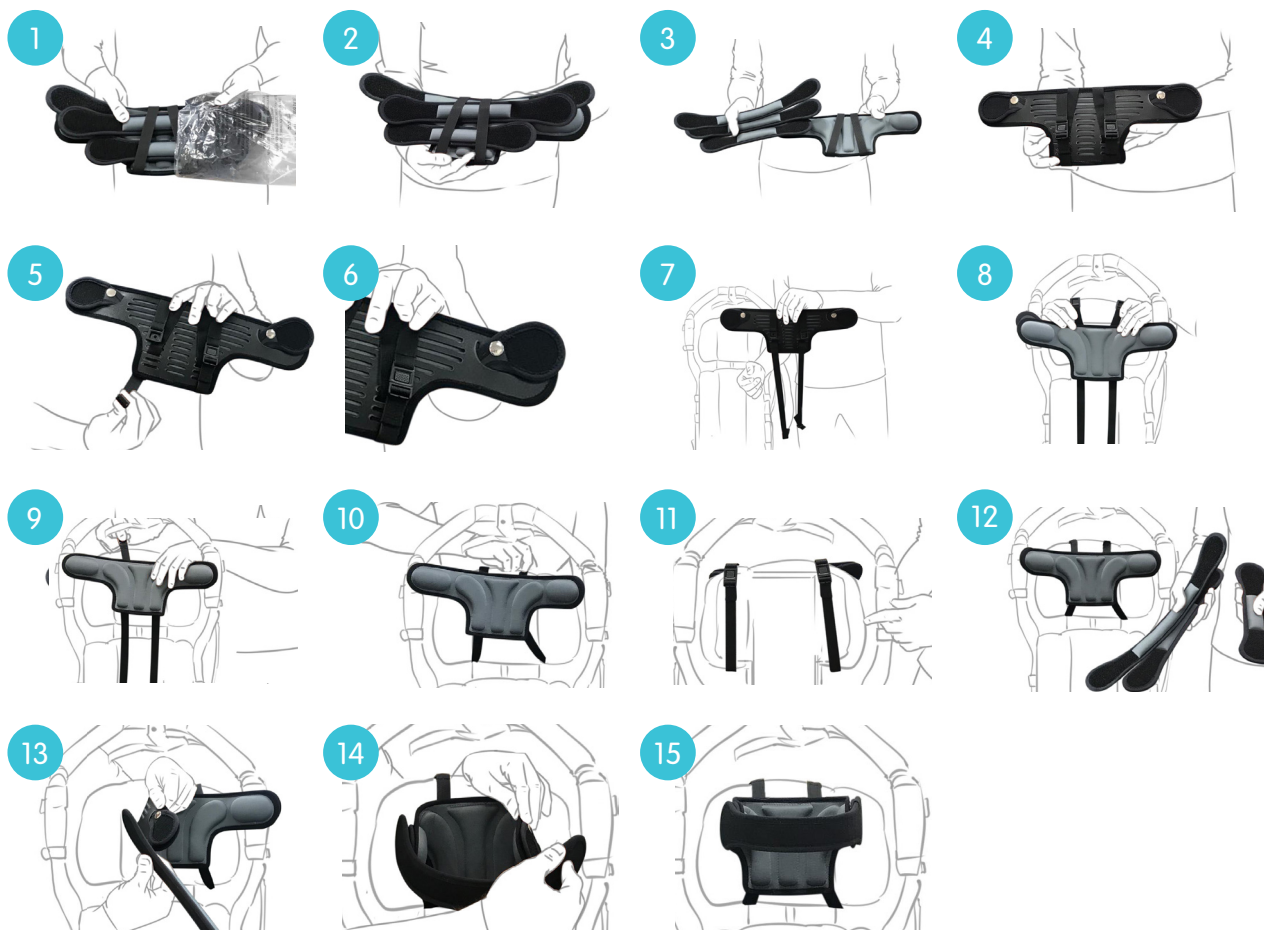

Mantenimiento:

HEADALOFT™ no requiere mantenimiento como tal. Es extremadamente duradero y solo requiere lavado ocasional. Se puede lavar a máquina a temperaturas de hasta 30°C / 86°F. Sin embargo, no se debe usar lejía ya que esta puede dañar la apariencia y el material.

Después de lavar el **HEADALOFT™**, no debe plancharlo ni ponerlo en la secadora. Déjelo secar de forma natural. Tampoco debe lavarse en seco.

Almacenamiento:

Cuando no esté en uso, el **HEADALOFT™** debe almacenarse en un área limpia y seca.

Headovations fue fundada en 2014 por Ben Cohen Gazit. Se dedica a proporcionar sistemas de soporte innovadores para la cabeza.

HEADALOFT™ ha demostrado ser extremadamente eficaz para niños y adultos con trastornos motores, trastornos neuromusculares, trastornos neurológicos (por ejemplo, parálisis cerebral) y lesiones físicas.

Developed by:

Headovations
HEAD SUPPORT SOLUTIONS

In Partnership with:

ALYN
HOSPITAL
Pediatric & Adolescent
Rehabilitation Center

NON
STERILE

MD

headaloft.com

Version: June 2022/2ndRev

Product May Differ From Shown

HEADOVATIONS LTD

3 Adirim st. Tel-Aviv
6918414 Israel



EC REP

Obelis Group,
Bld. Général Wabis, 53,
Brussels, 1030, Belgium