

HEADALOFT™

Monteringsanvisning och underhåll

HEADALOFT™ är en patenterad innovativ produkt för vuxna och barn som behöver stöd för huvudet i rullstol, sittvagn eller bilstol. Produkten är krocktestad och uppfyller kraven för CE-märkning enligt MDR.

HEADALOFT™ är bekvämt och ger huvudet och nacken flexibelt stöd i en upprätt position hos barn och vuxna

Pannbågen och nackstöd passar på alla rullstolar med nackstöd samt på de flesta bilbarnstolar. **HEADALOFT™** är ett optimalt stödjande tillbehör för de allra flesta huvudstöd. Montering är mycket enkel och det flyttas lätt mellan olika rullstolar, sittvagnar eller bilstolar – alla hjälpmedel som har ett huvudstöd som tillåter montering av **HEADALOFT™**

Till **HEADALOFT™** finns ett occipitalstöd som tillbehör och detta kan användas när stöd behövs för nacken.



Specifikationer


- Hållbara och bekväma kvalitetsmaterial.
- **HEADALOFT™** är flammtestat.
- 3 storlekar av pannbåge medföljer som vart och ett finjusteras med kardborrefästen.
- Fästs intuitivt på alla huvudstöd av vanligaste standardformaten.
- Passar de flesta bilstolar.
- Krocktestat samt CE-märkt enligt MDR.
- Ger stöd 360° runt huvudet
- Uppfyller bland annat OKEOTEX 100.



Headovations lämnar 1 års garanti från köpdatum, för material- och produktionsfel. Detta under förutsättningen att produkten har originalmärkning och att den har hanterats och förvarats enligt Headovations instruktionen. När Headovations konstaterat fel ersätts den defekta produkten.

Monteringsanvisning:

HEADALOFT™ monteras mycket snabbt och enkelt. Följ dessa steg.

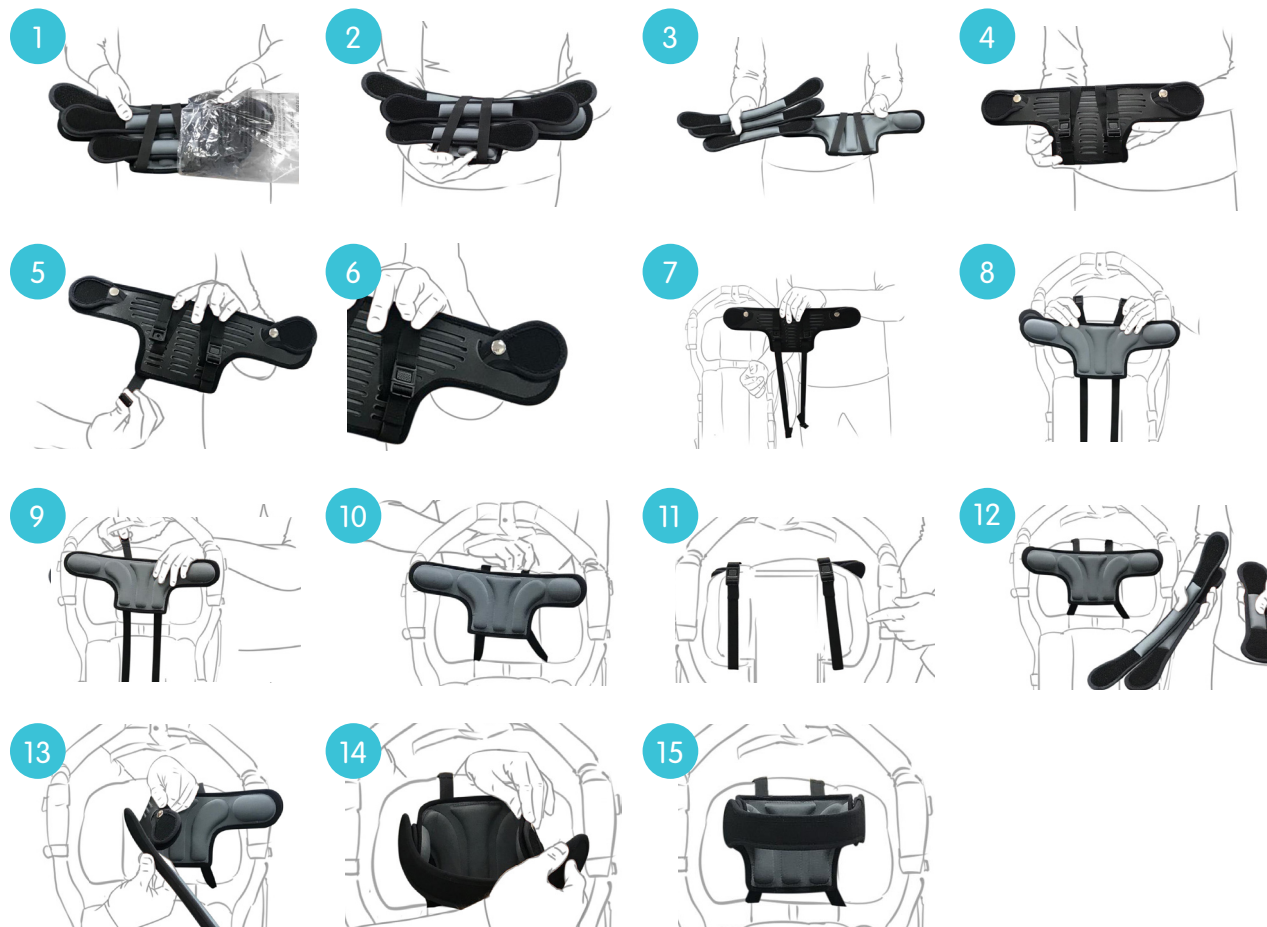

Den mindre nackstödsudden kan användas för extra stöd vid behov.

Tvätt och underhåll:

HEADALOFT™ kräver inte något särskilt underhåll. Materialen är mycket hållbara och kräver endast tvätt då och då vid behov. Hela headaloft kan tvättas i maskin på 30°C. Blekmedel ska inte användas eftersom detta kan skada materialet.

HEADALOFT™ ska lufttorkas. Använd inte torktumlare eller strykjärn. Huvudstödet ska inte kemtvättas.

Förvaring:

HEADALOFT™ ska förvaras tørt och i rena utrymmen.

Headovations startades 2014 av Ben Cohen Gazit med syfte att erbjuda innovativa huvudstödssystem.

HEADALOFT™ är mycket uppskattat hos både barn och vuxna med muskelsvaghet, motoriska funktionshinder, neurologiska funktionshinder så som Cerebral Pares med mera, liksom vid fysiska skador efter olyckor.

Developed by:

Headovations
HEAD SUPPORT SOLUTIONS

In Partnership with:

ALYN
HOSPITAL
Pediatric & Adolescent
Rehabilitation Center

NON
STERILE

MD

headaloft.com

Version: Juni 2022/V.2
Mindre utseendevariationer kan
förekomma

HEADOVATIONS LTD
3 Adirim st. Tel-Aviv
6918414 Israel



EC REP

Obelis Group,
Bld. Général Wahis, 53,
Brussels, 1030, Belgium